



# EINFACH ENTFALTEN.

BLUTSTILLENDE UND VERSIEGELNDE WIRKUNG<sup>1,2,3,4</sup>

ZWEI MÖGLICHE ANWENDUNGSTECHNIKEN VON HEMOPATCH IN DER MINIMAL-INVASIVEN CHIRURGIE.

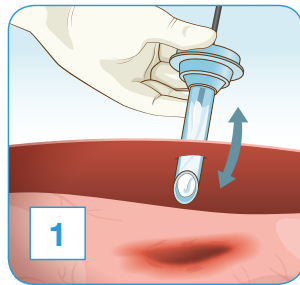

1 Innenseite des Trokars mit einer sterilen Kompresse trocknen.

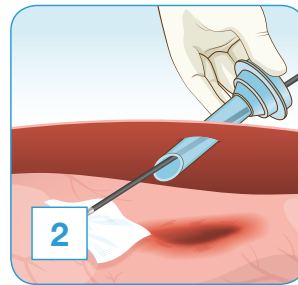

2 Neue saubere Kompresse (Fadensicherung!) zur späteren Druckausübung auf HEMOPATCH im Wundgebiet ablegen.

## ANWENDUNGSTECHNIK ROLLEN:




3a HEMOPATCH mit trockenen Handschuhen und trockener Fasszange aufnehmen, die nicht-beschichtete Fläche mit den blauen Quadraten zeigt nach oben.




4a HEMOPATCH vorsichtig von innen nach außen um die Fasszange wickeln.


oder

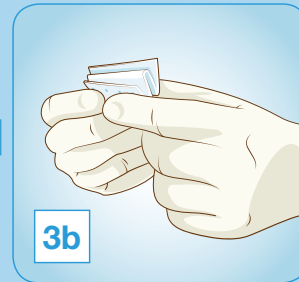


3b HEMOPATCH mit trockenen Handschuhen aufnehmen und Ziehharmonikaartig falten (M-Form). Die nicht-beschichtete Fläche mit den blauen Quadraten zeigt dabei nach außen.

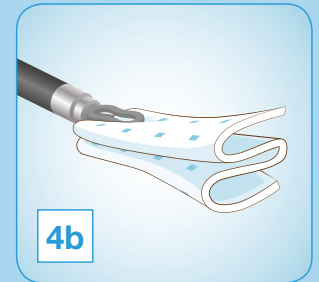


4b Gefaltetes HEMOPATCH an der Schmalseite mit der Fasszange greifen.

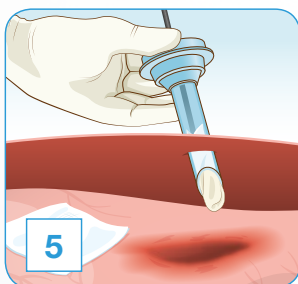

5 HEMOPATCH in den Trokar einführen.

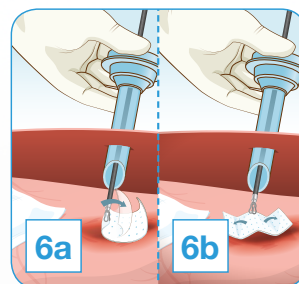

6a Fasszange öffnen. HEMOPATCH entrollt bzw. entfaltet sich.

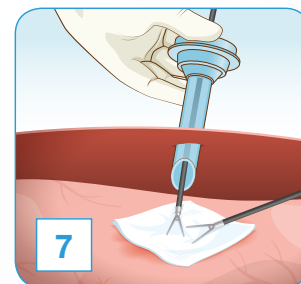


7 HEMOPATCH auf die Blutung applizieren und mit einer Kompresse 2 Minuten gleichmäßig andrücken. Nach erfolgreicher Blutstillung HEMOPATCH in situ belassen. Heben Sie HEMOPATCH nicht an um es auf Adhärenz zu prüfen.

# OPTIMIERT FÜR DEN OP-ALLTAG: DIE HEMOPATCH-FORMATE

| Bestellinformationen | Größe        | Artikelnummer | Pads pro Box* | PZN      |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| HEMOPATCH - Größe L  | 4,5 x 9,0 cm | 1506253       | 3             | 13919874 |
| HEMOPATCH - Größe M  | 4,5 x 4,5 cm | 1506256       | 3             | 13919868 |
| HEMOPATCH - Größe S  | 2,7 x 2,7 cm | 1506257       | 5             | 13919851 |


\* Jedes Pad ist einzeln doppelt steril verpackt.

## WICHTIGE HINWEISE FÜR SIE

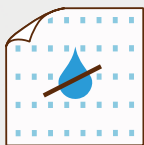

### Trockenes HEMOPATCH

Produkt vor der Applikation **nicht** in eine **Lösung einlegen** (z.B. physiologische Kochsalzlösung), da dies den Wirkmechanismus der NHS-PEG-Beschichtung beeinträchtigen kann. Bitte verwenden Sie auch **trockene Handschuhe, trockene Instrumente** und eine **trockene Kompresse**.<sup>1</sup>

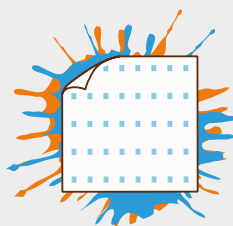

### Feuchte Gewebeoberfläche

HEMOPATCH erreicht die optimale Adhärenz bei Kontakt mit Wundflüssigkeit wie Blut oder anderen Körperflüssigkeiten: die NHS-PEG-Beschichtung bildet ein **Hydrogel** aus, das die Gewebeoberfläche versiegelt.<sup>1</sup>

## ANWENDUNGSGEBIETE

HEMOPATCH dient als Hämostatikum und chirurgischer Versiegeler bei Eingriffen, bei denen eine Blutstillung bzw. Abdichtung gegen den Austritt anderer Körperflüssigkeiten oder von Luft mit konventionellen chirurgischen Verfahren ineffektiv oder unpraktikabel ist. HEMOPATCH kann zum Schließen von Duradefekten nach traumatischen Verletzungen, Exzision, Retraktion oder Schrumpfung der Duramater verwendet werden.

## LITERATURHINWEISE

- HEMOPATCH Sealing Hemostat Gebrauchsanweisung, März 2017, Baxter AG Österreich
- Ulrich et al. Intra-operative Use of Hemopatch®: Interim Results of a Nationwide European Survey of Surgeons. Surg Technol Int. 2016 Apr; 28:19–28.
- Gulle et al. 2015, Internal Data on File; Daten aus Tiermodellen
- Gulle et al. 2017, Internal Data on File; Daten aus Tiermodellen

## Ausführliche Produktinformationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.



[www.baxterprofessional.de](http://www.baxterprofessional.de)

CE 0297

Baxter and HEMOPATCH are trademarks for Baxter International Inc., its subsidiaries or affiliates.

Baxter Deutschland GmbH  
Edisonstr. 4  
85716 Unterschleißheim  
☎ +49 (0) 89 317 010  
☎ +49 (0) 89 317 01 235  
[www.baxter.de](http://www.baxter.de)

Baxter Healthcare GmbH Österreich  
Stella-Klein-Löw-Weg 15  
1020 Wien  
☎ +43 (0) 17 11 20 0  
☎ +43 (0) 1711 20 24 510 20  
[www.baxter.at](http://www.baxter.at)



### BESTELLSERVICE:

Kostenlose Bestell-Hotline Deutschland: +49 800 7235 636  
Kostenloses Fax Deutschland: +49 800 1010619  
Kostenlose Bestell-Hotline Österreich: +43 17 11 20 0  
Kostenloses Fax Österreich: +43 17 11 20 24 510 20

**Baxter**